



Produktinformation

Rev.: 02-2010



CE
0124

Präparatetyp:

UNIGLOVES Absauganlagen-Desinfektion ist ein hochwirksames Desinfektionsmittel für Absauganlagen mit und ohne Amalgamabschneider.

Anwendungsbereiche:

UNIGLOVES Absauganlagen-Desinfektion ist ein Spezialpräparat zur gleichzeitigen Desinfektion, Reinigung und Pflege aller Absauganlagen. Die Ablagerung von Detrin, Amalgam, Füllmaterial, Speichel und Schleim in Schläuchen, Sekrettöpfen sowie Ableitungsrohren wird verhindert. Unangenehme Geruchsbildung wird unterbunden. UNIGLOVES Absauganlagen-Desinfektion ist ein extrem schaumarmes Produkt.

Dosierung:

Mindestens einmal täglich nach Arbeitsschluß pro Absaugstelle 25 ml UNIGLOVES Absauganlagen-Desinfektion in einem Liter Wasser verdünnen und durch die zu reinigenden Schläuche etc. saugen. UNIGLOVES Absauganlagen-Desinfektion wirkt über Nacht. Es ist kein Nachspülen mit Wasser erforderlich. Ein 10 l Kanister reicht für ca. 400 Anwendungen.

UNIGLOVES Absauganlagen-Desinfektion enthält alle zur Pflege der Absauganlage nötigen Bestandteile.

Nicht mit Zusätzen oder anderen Präparaten mischen!

Wir empfehlen: Vor der Anwendung von UNIGLOVES Absauganlagen-Desinfektion die Absauganlage mehrmals vollständig mit klarem Wasser durchspülen, damit die Anlage mit unserem Präparat problemlos funktioniert.

Mikrobiologie:

UNIGLOVES Absauganlagen-Desinfektion wirkt:

- bakterizid und fungizid
- viruzid (HBV/HIV) 5 Minuten = 2,5% (25 ml/l)

Zusammensetzung:

In 100,0 g der Lösung sind enthalten:
16,00 g Polyhexanid 20%

Chemisch-Physikalische Daten:

Aussehen des Konzentrates: klare, blaue Flüssigkeit
pH Wert: $5,0 \pm 0,5$
Dichte: (20°C) 1,000 – 1,010

Kennzeichnung gem. EG-Richtlinien/GeStoffV:

- Xi Reizend.
R 43 Sensibilisierungen durch Hautkontakt möglich.
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 24 Berührungen mit der Haut vermeiden.
S 37 geeignete Schutzhandschuhe tragen.
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Besondere Hinweise:

Vor Gebrauch immer die Präparateinformationen und das Sicherheitsdatenblatt (www.unigloves.de) lesen.

Lieferformen:

2 Liter PE Flasche
5 Liter PE Kanister
10 Liter PE Kanister

Art.-Nr.: 90-402

Art.-Nr.: 90-405

Art.-Nr.: 90-410

Gutachten:

Dr. arg. Färber, Giessen: Gutachten zur Geräte-Desinfektion vom 04. 12. 2001