



#### Präparatetyp:

UNIGLOVES Hygienetücher sind ein Desinfektionsmittel zur Reinigung von kleinen Flächen, Geräten, Hand- und Winkelstücken usw.

#### Anwendungsbereiche:

UNIGLOVES Hygienetücher sind für alle Bereiche der Praxis und des Krankenhauses geeignet:

- Alle dental-medizinischen Bereiche
- Behandlungseinheiten, OP-Tische, medizinisches Inventar, usw.
- Desinfektion kleiner Geräte

**Nicht anzuwenden auf alkoholempfindlichen Flächen, wie Acrylas.**

#### Mikrobiologie:

UNIGLOVES Hygienetücher wirken:

- bakterizid (inkl. Tb, MRSA und Mycobacterium terrae)
- fungizid
- viruzid (HBV/HIV) + HCV

#### Einwirkzeit nach VAH/DGHM: 5 Minuten

#### Einwirkzeit nach Gutachten:

Hospitalismusprophylaxe: 30 Sekunden  
Tbc und Mycobacterium terrae: 1 Minute  
Hepatitis C: 30 Sekunden  
HBV-viruzid (HIV) ohne Eiweißbelastung: 1 Minute  
HBV-viruzid (HIV) mit Eiweißbelastung: 3 Minuten

#### Zusammensetzung:

In 100g der Tränklösung sind enthalten:  
33,66 g Ethanol  
15,84 g 2-Propanol  
0,05 g N,N-Didecylid-N,N-dimethylammoniumchlorid  
pH-Regulatoren

#### Chemisch-Physikalische Daten:

Aussehen des Konzentrates: klare, grüne Flüssigkeit  
pH Wert: ca. 5,0  
Angaben beziehen sich auf Lösung vor Tränkung der Tücher.

#### Kenzeichnung gem. EG-Richtlinien/GeStoffV:

- R 10 Entzündlich.
- S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- S 7 Behälter dicht geschlossen halten.
- S 16 Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen.
- S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

#### Besondere Hinweise:

Vor Gebrauch immer die Präparateinformationen und das Sicherheitsdatenblatt ([www.unigloves.de](http://www.unigloves.de)) lesen.

#### Lieferformen:

- |                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Spenderdose mit 90 Tüchern     | <b>Art.-Nr.: 9095</b>     |
| Nachfüllbeutel mit 90 Tüchern  | <b>Art.-Nr.: 9094</b>     |
| Spenderdose mit 120 Tüchern    | <b>Art.-Nr.: 9095-120</b> |
| Nachfüllbeutel mit 120 Tüchern | <b>Art.-Nr.: 9094-120</b> |
| Nachfüllbeutel mit 200 Tüchern | <b>Art.-Nr.: 9092-300</b> |

#### Listung:

Tränkflüssigkeit VAH/DGHM gelistet  
UN-Nr. 3175

#### Gutachten:

Prof. Dr. med. Werner, Schwerin: Gutachten über die Eignung als Flächendesinfektionsmittel vom 02. 10. 2001;  
Gutachten über tuberkulozide Wirkung Phase 2/Stufe 2 vom 19. 01. 2004; Gutachten über tuberkulozide Wirkung vom 26. 07. 2005;  
Gutachten über die Wirksamkeit gegen S. aureus/MRSA mit hoher Belastung vom 29. 11. 2005

Dr. med. habil. Georg Schrader, Weimar: Gutachten über Standardmethoden der DGHM zur Prüfung chemischer Desinfektionsmittel vom 20. 06. 2005 (Prüfbericht nach DIN EN 14348); Gutachten über tuberkulozide Wirkung vom 17. 08. 2005

Institut Dr. agr. Färber, Giessen: Gutachten über die Eignung als Flächendesinfektionsmittel zur Hospitalismusprophylaxe vom 30. 11. 2001